

Les avantages en bref :



Les fonctions de prévention permettent d'éviter les chutes.



La détection immédiate des chutes permet une réaction plus rapide.



Les chutes graves peuvent être reconstituées et analysées.



Les stations d'accueil permettent une utilisation mobile.




Entièrement conforme au RGPD.



cogvisAI offre un maximum de sécurité pour votre établissement!



Les fonctions de prévention permettent d'éviter plus de 50 % de chutes avant qu'elles ne succèdent.

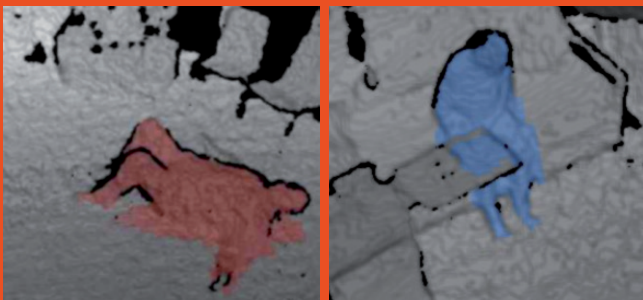

Images de profondeur cogvisAI « Chute » et « S'asseoir »

Du fait que cogvisAI utilise exclusivement des données 3D anonymes, la protection de votre vie privée et de celle de vos résidents est garantie à tout moment.

Votre contact commercial :

Vos notes :

HealthCare
supported by
HealthTech

deep learning

AI

cognitive decline

cogvisAI

La solution de soins intelligente

Bureau

+43 1 236 058 0
office@cogvis.ai
www.cogvis.ai

Service client

+43 1 417 0 714
support@cogvis.ai

cogvis.ai

Qu'est-ce que cogvisAI ?

A l'aide d'un capteur intelligent 3D, cogvisAI sait détecter et analyser un mouvement dans la pièce et, en cas de situations ou événements délicats, déclencher une alarme.

CogvisAI réunit de nombreuses fonctions des systèmes conventionnels, tels que les tapis de chute, les barres de lit et les systèmes de désorientation, ce qui réduit considérablement votre travail dans les soins quotidiens.



capteur intelligent 3D
cogvisAI



A partir
de 2023

activity of
daily living

3D

leading
technology in
fall prevention,
absence and
fall detection

Voici les modules cogvisAI actuels :



La prévention des chutes

permet d'éviter les chutes grâce au déclenchement d'alarme quand une personne à risque se redresse, s'assoit ou se lève.




La détection des chutes

déclenche immédiatement une alarme via le système d'appel malade en cas de chute ou autre pour garantir une intervention rapide.



L'analyse des chutes

sert à reconstruire la trajectoire d'une chute et à savoir comment une personne est tombée.

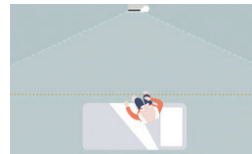

La barre de lit virtuelle

remplace des restrictions physiques et augmente le sentiment de liberté des résidents et patients.




La détection d'absence

aide à éviter des dangers et renforce la sécurité des résidents en cas d'une durée d'absence inhabituelle.



La détection d'agressivité

augmente la sécurité des résidents et du personnel soignant grâce à la détection rapide d'un comportement agressif.

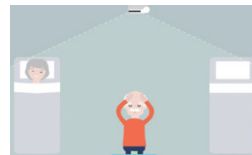

La prévention des suicides

protège des personnes à risques restant, par exemple, plus de 20 secondes devant la fenêtre grâce à une détection rapide des situations délicates.



La commande de lumière

sait activer l'éclairage de secours seulement si la personne souhaite se lever contrairement à des détecteurs de mouvement conventionnels.

Des directives importantes

cogvisAI alerte via le système d'appel malade


Les capteurs intelligents 3D cogvisAI sont couplés au système d'appel. En cas de détection d'une situation délicate (risque de chute, chute, absence inhabituelle etc.) une alarme sera déclenchée via le système d'appel. Le cas échéant, vous pouvez consulter la plate-forme cogvisAI pour en savoir plus de l'alerte.

Vous pouvez désactiver le système cogvisAI à tout moment :

Pour éviter une alerte lors des activités de soins, vous avez la possibilité de désactiver le système cogvisAI à tout moment en rentrant dans la pièce. Il suffit d'appuyer sur la touche de présence qui se trouve près de la porte.


Voici comment ça marche ...

1. Consulter la touche

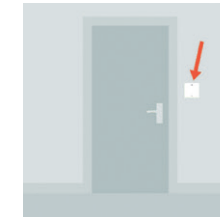


Normalement, la touche se trouve près de la porte de la chambre du résident.

2. Désactiver le système

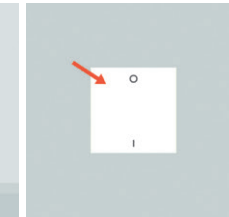

Vous pouvez désactiver le système pour une certaine période en appuyant sur **O**.

3. Vérifier

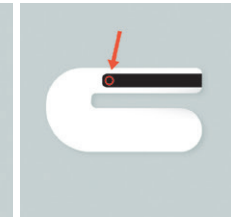

Si la lumière rouge derrière le cache est éteinte, le système est désactivé.

Remarques :

- Le système cogvisAI est désactivé lors de la période que vous avez indiquée.
- Vous pouvez prolonger la période de désactivation en appuyant sur **O** ou bien sur la plate-forme cogvisAI.
- Pour réactiver le système avant la fin de la période, il suffit d'appuyer sur **I**.



Pour savoir comment introduire cogvisAI dans votre établissement de la meilleure façon, n'hésitez pas à contacter votre personne de référence cogvis ou le service client cogvis (voir contact au dos).